



天然素材の消臭剤

Bio-TC®

バイオ・ティーシー

No.001

Bio-TC® とは



- 製材所から生じる天然樹皮（京都・北山杉）を原料としたエコ消臭剤です。
- 安全で“人にやさしい”天然素材が主原料です。
- 様々な悪臭を吸着する事で、素早く消臭し、効果が持続します。
このため、福祉用具のレンタルから戻ってきた製品の除臭や介護現場での消臭に最適です。



No.002

Bio-TC® の特長



4大悪臭

優れた消臭力

- 4大悪臭※1を始めとする様々な悪臭に対して広く効果があります。
※1アンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メルカプタン類

- 別の臭いでごまかすのではなく、悪臭物質を直接吸着して除去します。

- 一度吸着した悪臭物質を離しませんので、即効性があり、効果が持続します。

安全性に優れ、取扱いが簡単

- 天然素材ですので、肌に触れても安全で、取扱いが大変簡単です。

- マットレスなどの肌に触れる福祉用具やご利用者の多い介護現場でも安心してお使い頂けます。

人と地球にやさしい、エコな消臭剤

- 製材所で大量に生じる京都・北山杉の樹皮を原料とし、独自の特許技術により製造しています。

- 樹皮を再利用する事で、環境や循環型社会に貢献します。

- 京都産業エコ・エネルギー推進機構※2から『京都エコスタイル製品』の認定を受けました。

※2 京都産業エコ・エネルギー推進機構は、京都府、京都市などを始めとするオール京都体制の下で、
京都におけるエコ・エネルギー分野の産業創出などを推進支援する組織です。



ケアメディックス株式会社

No.003

Bio-TC® の使用場面



Bio-TC®は様々な悪臭に効果があり、安全性にも優れているため、多くの場所や状況でご使用でき、特に以下のような介護場面でのご使用に最適です。

- 福祉用具レンタルにおいて、返却された製品を洗浄したが臭いが取れずお困りの福祉用具貸与事業者様。
- ご使用の福祉用具（寝具マットレス・車いす付属クッションやシートなど）の臭いを取り除きたいご利用者様やご家族様。
- 介護現場において臭いにお悩みの介護施設様。
- 寝具洗浄の際、除臭にお困りの寝具洗浄業者様。

<介護・福祉関連企業様へ>



<お困りの福祉用具の臭いを解決します！>



No.004

Bio-TC® の使用方法



Bio-TC®は水溶性で、安全な消臭剤ですので消臭したい対象や、程度に合わせた様々な使い方ができます。


- 福祉用具の除臭：臭気が軽度のものは Bio-TC®を表面に直接吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます。
 - 室内の消臭：室内の大気中に Bio-TC®を噴霧します。
 - 悪臭発生箇所（ゴミ集積場など）の消臭：臭いの発生箇所にBio-TC®を散布します。
- ※Bio-TC®は、臭気の強弱に合わせ、適度な濃度に水で希釈し、お使いください※

No.005


Bio-TC® の消臭性能




アンモニア

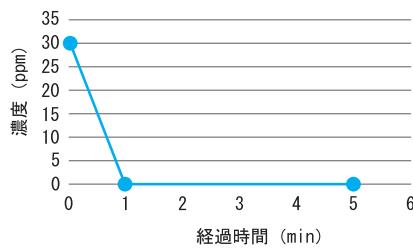

エチルメルカプタン

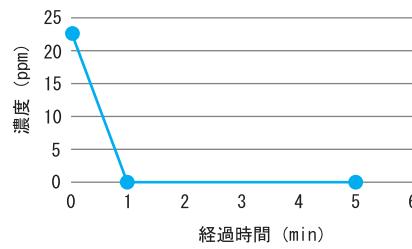

イソ吉草酸

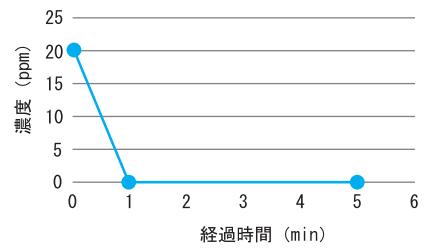

ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23番1号

TEL 03-3837-0551(代表) FAX 03-3837-0554 URL <http://www.caremed.co.jp>

2019.03