

安全で快適な生活のお手伝い

DECPAC®

デクパック

車椅子用段差解消スロープ

公的介護保険
レンタル対象品

バリアフリースロープが
あなたの行動範囲を広げます!



ケアメディックス株式会社


デクパックの構造と特長

「デクパック」は福祉の先進国オーストラリアで生まれた車椅子用段差解消スロープです。軽くて丈夫なパネル構造と独自に考案された折りたたみ構造には、安全で快適にご使用いただくための様々な工夫が盛り込まれており、世界数十カ国に特許が申請されています。

(オーストラリア特許 669905 アメリカ特許 5671496 ヨーロッパ特許 646209B1 日本 平成6年特許願 第500962号)

デクパックの構造

- 本体パネルは独自に設計されたFRP(繊維強化プラスチック)で構成されています。
- 本体パネル同士をヒンジベルトで結合する独自の折りたたみ構造が、接地面の微妙な凹凸を吸収します。
- 先端部は段差に対応しスムーズな乗り降りができるよう独自の形状となっています。

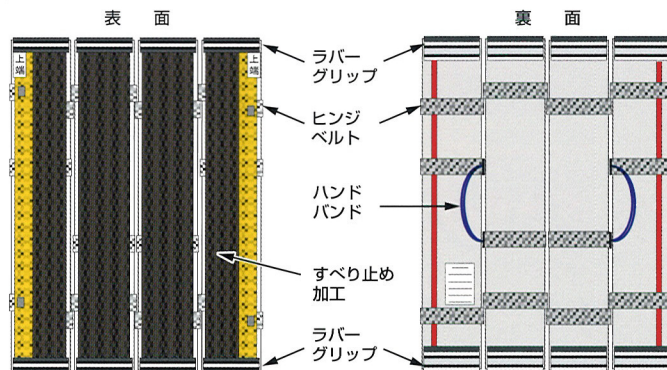


デクパックの特長

軽くて強い!

耐荷重 300kg で安心してご使用になれます

- デクパックはFRP(繊維強化プラスチック)複合材料ですので極めて軽く、また使用中のたわみが少なく安心してご使用いただけます。
- 全品種とも耐荷重 300kg ですので、電動車椅子や介助する方が一緒に乗っても安全です。
- 優れた剛性により、途中に支柱を入れる必要が無く、最長3.5mまでのスロープが可能になりました。

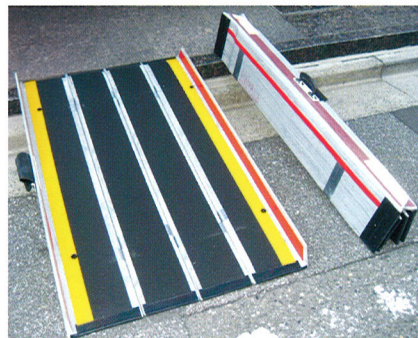

持ち運びが容易で、簡単にセットできます

- デクパックは幅方向に折りたためますので持ち運びが容易で、簡単にセットできます。
- 使用後は収納スペースをとらずに保管できます。
- ハンドバンドを利用すると手を汚さず簡単に持ち運びやセットができます。
- パーソナル、M.P.タイプには車椅子に搭載して外出できるキャリングバッグがオプションで用意されています。



滑りにくく、安全にご使用いただけます





- 表面には特殊なすべり止め加工が施されていますので、雨の日でも安心してご使用になれます。
- 上下端にはラバーグリップ(ズレ止め用ゴム材)が取り付けられていますので、接地面をしっかりグリップします。
- EBLタイプには両側に脱輪防止用のエッジが付いていますので、電動車椅子の方でも安全に使用できます。



デクパックをご使用いただく上で

スロープの角度が急になると、介助する方の負担が大きくなるだけでなく、車椅子に乗られている方の安全まで支障が生じることがあります。段差とご使用になる状況に合わせてデクパックをお選び下さい。

《デクパックが使用できる段差の目安》

タイプ	スロープ長	使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差	
			5°  介助者なしで使用	8°  高齢者の方が介助	12°  健常者の方が介助	15°  通常に使用できる限界	
パーソナル	70cm		6cm	9cm	12cm	17cm	
M.P.	87.5cm		8cm	11cm	15cm	22cm	
EBL	シニア		90cm	8cm	11cm	16cm	22cm
			1.2m	10cm	15cm	21cm	30cm
			1.35m	12cm	17cm	24cm	34cm
			1.65m	15cm	20cm	29cm	41cm
EBL	シニア		1.85m	16cm	23cm	32cm	47cm
			2.0m	18cm	25cm	35cm	50cm
			2.5m	22cm	31cm	44cm	63cm
			3.0m	26cm	37cm	55cm	75cm
	3.5m	31cm	43cm	61cm	88cm		

※車椅子の種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。上の表は目安としてお使い下さい。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使い下さい。



デクパックのご使用方法

《設置方法》

- ①設置場所まではハンドバンドを持って運んでください。
- ②「上端」と書かれている部分が段差の高い方へ、本体の黒いすべり止面が表になるように置きます。
- ③「上端」と書かれた側のラバーグリップが、少なくとも**4cm以上**接地面と接触するように位置を調節します。
- ④正しい位置に調節できたら、上になったハンドバンドのみを持ち、本体を持ち上げるようにして広げます。(シニアタイプのみ最後の1枚は手で広げます)
- ⑤最後に、ラバーグリップが接地面と十分接しており、本体が浮き上がったり外れていないかを確認します。

《折りたたみ方法》

- ①シニアタイプのみ最後の一枚を手で折りたたみ、ハンドバンドを露出させます。
- ②ハンドバンドを持ち、本体を持ち上げるようにして反対側から順に折りたたみます。
- ③二本のハンドバンドを持ち、移動させます。

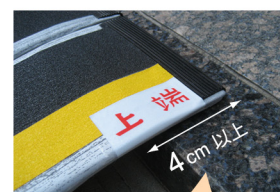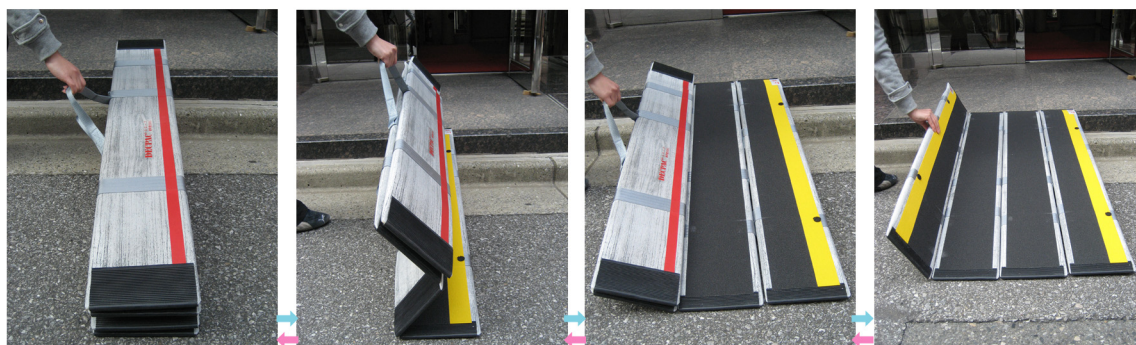

少なくとも**4cm以上**接地面と接触するようにしてください。

デクパック標準小売価格表

タイプ 長さ	規 格			標準小売価格		JANコード	
	幅×長さ	折りたたみ時 厚み×幅×長さ	重 量	税込価格	(本体価格)		
パーソナル	73.5cm×70cm	7cm×24.5cm×70cm	約4kg	¥58,800	(56,000)	4958519411106	
M.P.(エムピー)	84cm×87.5cm	7cm×28cm×87.5cm	約5kg	¥72,450	(69,000)	4958519412004	
シニア	90cm	74cm×90cm	13cm×18.5cm×90cm	約6kg	¥73,500	(70,000)	4958519413605
	1.2m	74cm×120cm	13cm×18.5cm×120cm	約7kg	¥85,050	(81,000)	4958519413100
	1.35m	74cm×135cm	13cm×18.5cm×135cm	約8kg	¥89,250	(85,000)	4958519413209
	1.65m	74cm×165cm	13cm×18.5cm×165cm	約10kg	¥107,100	(102,000)	4958519413308
	1.85m	74cm×185cm	13cm×18.5cm×185cm	約11kg	¥118,650	(113,000)	4958519413506
	2.0m	74cm×200cm	15cm×18.5cm×200cm	約12kg	¥126,000	(120,000)	4958519413407
	2.5m	74cm×250cm	19cm×18.5cm×250cm	約18kg	¥217,350	(207,000)	4958519423505
	3.0m	74cm×300cm	19cm×18.5cm×300cm	約22kg	¥309,750	(295,000)	4958519423604
	3.5m	74cm×350cm	19cm×18.5cm×350cm	約29kg	¥352,800	(336,000)	4958519423703
EBL (イービーエル) ◎脱輪防止用 エッジ付 内寸高さ 6~8cm	90cm	81cm×90cm	13cm×24cm×90cm	約7kg	¥86,100	(82,000)	4958519414008
	1.2m	81cm×120cm	13cm×24cm×120cm	約8kg	¥98,700	(94,000)	4958519414107
	1.35m	81cm×135cm	13cm×24cm×135cm	約10kg	¥109,200	(104,000)	4958519414206
	1.65m	81cm×165cm	13cm×24cm×165cm	約12kg	¥122,850	(117,000)	4958519414305
	2.0m	81cm×200cm	15cm×24cm×200cm	約14kg	¥144,900	(138,000)	4958519414404
	2.5m	81cm×250cm	19cm×24cm×250cm	約21kg	¥242,550	(231,000)	4958519424502
	3.0m	81cm×300cm	19cm×24cm×300cm	約25kg	¥336,000	(320,000)	4958519424601
	3.5m	81cm×350cm	19cm×24cm×350cm	約32kg	¥373,800	(356,000)	4958519424700
オプション品 キャリングバッグ (車椅子に取り付け可能な携帯バッグ)			パーソナル用		¥6,930	(6,600)	
			M.P.用		¥7,350	(7,000)	

☆全品種最大荷重300kgです。

☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。

●使用上のご注意

- ★この製品は車椅子用段差解消スロープです。それ以外の用途・目的では使用しないでください。
- ★各タイプとも最大荷重は300kgです。それ以上の荷重がかかることは絶対にさけてください。
- ★必ず「上端」と書かれた部分が段差の高い方になるように設置し、先端のラバーグリップが4cm以上接していることを確認してください。
- ★設置したら、ハンドバンドが表面に出ていない事を確認してからご使用ください。ハンドバンドが表面に出てると車椅子や足にからむ恐れがあります。
- ★車椅子は脱輪を防ぐためゆっくりと真っ直ぐ進入し、スロープの両端にある黄色い縁ラインの内側を慎重に通行してください。また走行中に急ブレーキはかけないでください。
- ★介助する方が一緒にスロープを降りるときは、介助する方が先になり後ろ向きで降りてください。
- ★デクパックを設置または折りたたむ場合、本体のつなぎ目に指をはさまないようにご注意ください。
- ★落としたり、コンクリート、石、タイル等の硬い物にぶつけないように取り扱いにご注意ください。
- ★スロープに泥・砂・雪等が付着しているとすべり止め性能が低下しますので、常に洗浄して清潔な状態で使用してください。
- ★ご使用後は放置せずに室内に保管してください。

販売店

ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-1

TEL. 03-3837-0551 FAX. 03-3837-0554

HP. <http://www.caremed.co.jp/>